



Coronas

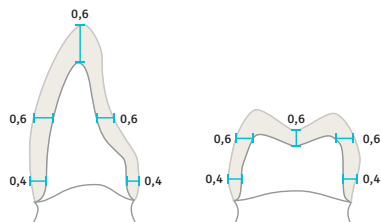

Carillas

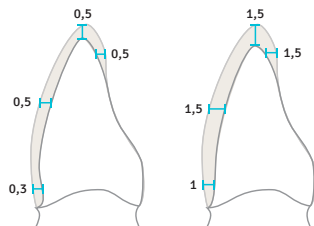

Diente sano Diente manchado

Implantes sumergidos




Seleccionar la altura gingival correcta, para elevar la conexión del implante lo más a ras posible de la encía.

Ventajas:


- Asegurar el grosor mínimo establecido.
- Evitar la descementación.

Dimensión vertical

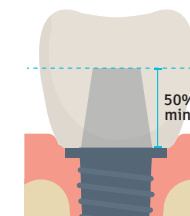


La interfase debe cubrir como mínimo el 50% de la altura total de la estructura de G-Cam, asegurando la estabilidad de la estructura y evitando la descementación.

Espesores alrededor del aditamento

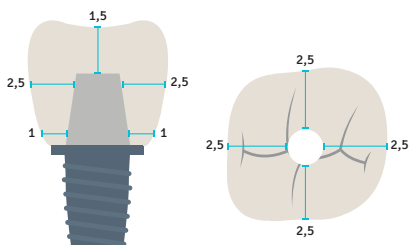


Conectores transversales

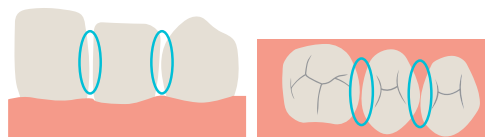


Min. 9 mm² Min. 13 mm²

Póntico

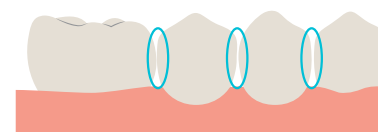


2 pónticos para puentes sobre coronas.
3 pónticos para puentes sobre implantes.
Conector transversal min 13 mm²

Cantilever

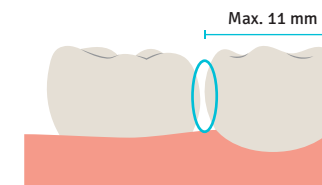


Mín. 13 mm² y no realizar individualizaciones de la estructura a nivel lingual o palatino.

Incrustaciones

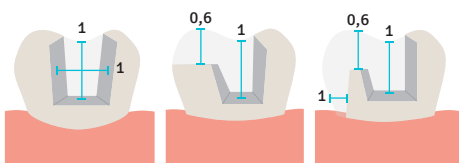


Tallados paralelos y márgenes definidos

Estrategia de fresado

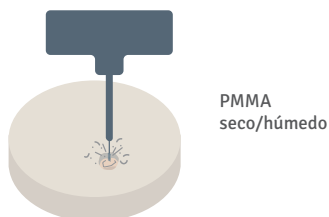

PMMA
seco/húmedo

Acabado

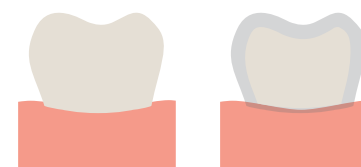

Monolítico Revestible

G-CAM

Disco de biopolímero reforzado con grafeno para fresado CAD/CAM



El registro de Graphenano dental y G-CAM en EE.UU. se puede comprobar en la página de registro y listado de dispositivos de la FDA.

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm>